



GL5 | GLS5

Gama de elevadores de suelo

Guldmann™

Elevador móvil GL5



Facilita las transferencias y reduce el riesgo de lesiones de espalda en los cuidadores. Además, mejora la comodidad y la seguridad de cuidadores y usuarios

Los elevadores móviles GL5 son las alternativas de suelo a las soluciones de elevación montadas en el techo de la gama de productos de Guldmann.

Escuchamos los consejos y las impresiones de nuestros usuarios durante más de un cuarto de siglo para crear la próxima generación de elevadores móviles en función de sus deseos y necesidades y las de los cuidadores y usuarios. Y seguimos haciéndolo

Creemos en la calidad, la sencillez y la atención a los detalles para ofrecer productos que crean más «tiempo para los cuidados».

La atención a los detalles, que facilita el uso del elevador y proporciona comodidad y una mayor seguridad en el proceso de elevación, convierte a los elevadores de suelo móviles GL5 en únicos.



**GL5 – la fuerza proviene
del interior**

Características del GL5

Tramo bajo – capacidad para elevar pesos directamente desde el suelo

Tramo alto – puede elevar usuarios altos con eslingas anchas sin dificultad

Flexibilidad – con la eslinga / los accesorios adecuados, el GL5 puede cumplir todos los requisitos de desplazamiento y manipulación

Facilidad de uso – uso cómodo para personas altas y bajas. Puede manejarse mediante el control manual o el panel de control

Fiabilidad – el GL5 es resistente, estable, fiable y seguro y se ha diseñado para el uso frecuente en entornos de trabajo profesionales

Inteligencia – la última tecnología proporciona acceso a las estadísticas a través de la SIC (consola de información del mantenimiento), que muestra

- El número de elevaciones
- El número de elevaciones desde el último mantenimiento
- La vida útil de los componentes (accionador, batería)
- Informes de errores
- Futuras actualizaciones de software

El GL5 también tiene un indicador visual de servicio y está preparado para futuras actualizaciones del software.

Diseño moderno – con carga interna y externa para adaptarse al entorno en el que se utilice. GL5 ha sido galardonado con el premio Red Dot Award por el diseño del sistema / elevador de techo GH3

Elevador completo – el GL5 soluciona múltiples situaciones de desplazamiento y manipulación, además de ser ergonómicamente seguro y sólido para cuidadores y usuarios.


eléctricos, que permiten un acceso sencillo alrededor de sillas y bañeras y la elevación desde el suelo.

Los elevadores móviles GL5, con múltiples funciones, responden a las necesidades y los requisitos de los entornos profesionales de asistencia, donde los equipos de elevación son muy necesarios. El esmerado diseño garantiza un amplio espacio de trabajo para que el cuidador realice una elevación del usuario segura y cómoda.

El elevador GL5 es muy estable, pues la configuración permite una capacidad de elevación perfectamente adecuada. Estos elevadores pueden cargarse interna o externamente para adaptarse a los diversos entornos de trabajo. Las ruedas de baja fricción, la palanca de empuje diseñada ergonómicamente y el diseño de elevación hacen que resulte más sencillo maniobrar los elevadores. Botones de uso sencillo, indicadores y funciones de seguridad con encendido y apagado automático, así como funciones de descenso y parada de emergencia de fácil acceso.

El elevador GL5 está disponible en dos modelos, con capacidades de elevación de 155 o 205 kg, respectivamente. Los dos modelos cuentan con elevación y ajuste de anchura



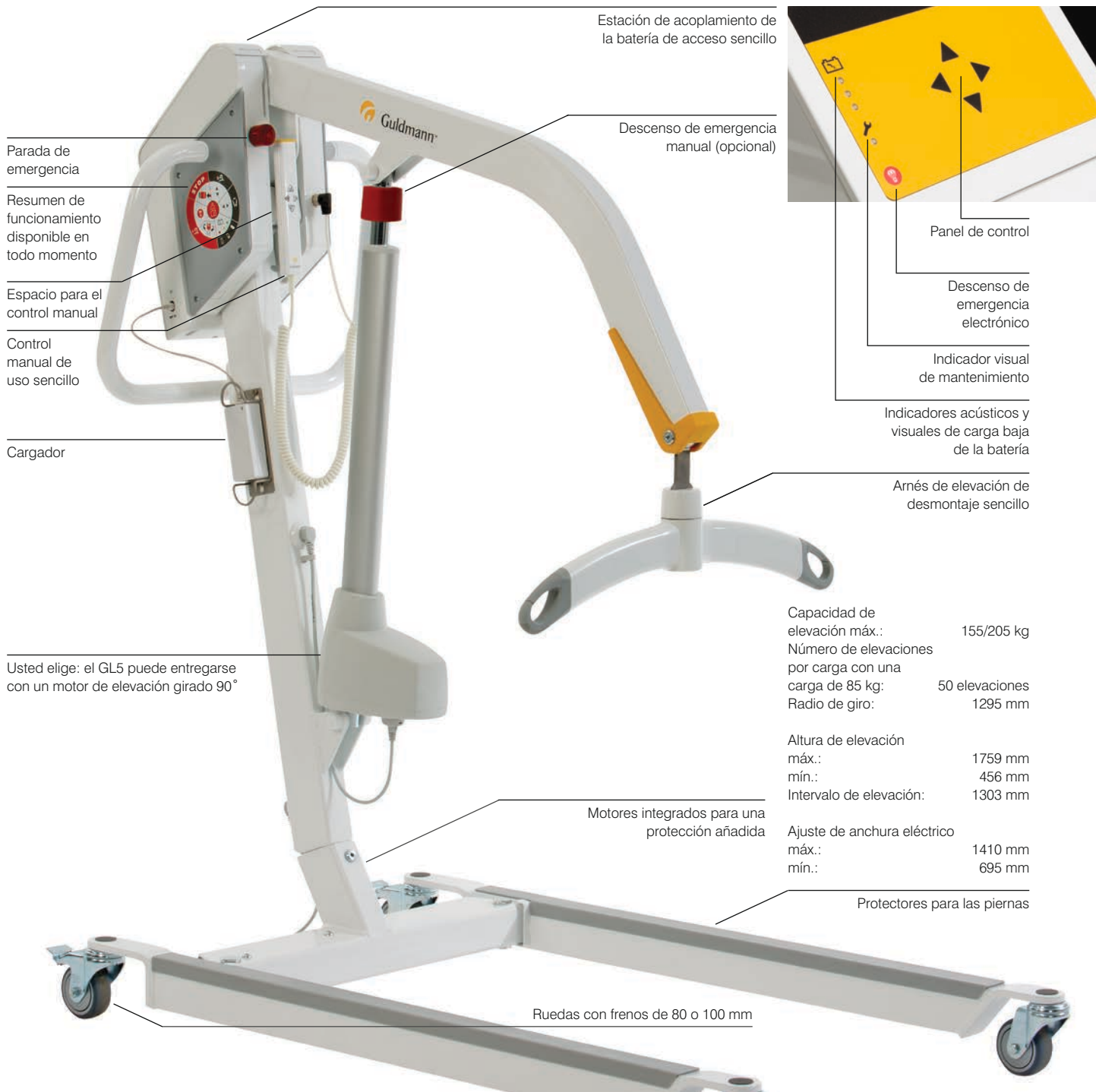

Capacidad de elevación máx.:	155/205 kg
Número de elevaciones por carga con una carga de 85 kg:	50 elevaciones
Radio de giro:	1295 mm

Altura de elevación máx.:	1759 mm
mín.:	456 mm
Intervalo de elevación:	1303 mm

Ajuste de anchura eléctrico máx.:	1410 mm
mín.:	695 mm


El GL5 se ocupa de todas las tareas de elevación



Elevación desde y hacia el suelo

GL5 puede levantar al paciente directamente desde el suelo hasta una silla o la cama. Por esta razón, GL5 es ideal en caso sea necesaria una elevación inesperada en un lugar donde no hay un sistema de elevación instalado en el techo. La sección inferior del elevador está diseñada para dejar mucho espacio para el paciente, además, el alcance considerable del brazo de elevación hace que el usuario no se sienta cerrado en un espacio estrecho.


GL5 es ideal para ser utilizado en fisioterapia, donde los usuarios necesitan ser levantados, por ejemplo, desde una silla hasta una colchoneta para ejercicios. La sección inferior se puede ajustar a la posición más amplia a fin de asegurar que hay espacio suficiente para llevar a cabo el levantamiento directamente sobre la colchoneta.

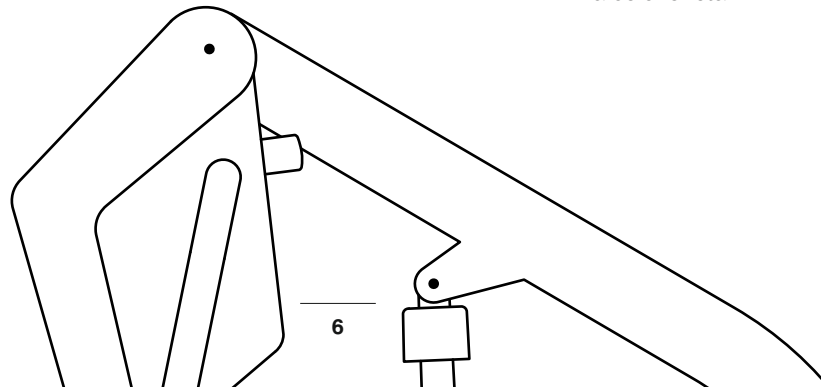

«Los elevadores móviles son especialmente adecuados para lugares y situaciones en las que no esté al alcance un sistema de elevación montado en el techo. Puede ser que no exista espacio para una instalación fija o que normalmente no se lleven a cabo elevaciones. Independientemente del motivo, un elevador móvil es un complemento práctico y rentable y un medio excelente de seguridad adicional»

Cuidador que se ocupa de pacientes de un modo seguro



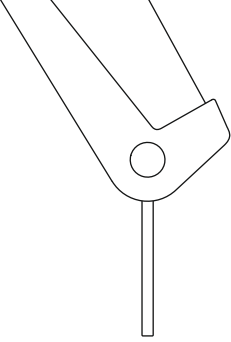

Desde las rutinas diarias...



Elevación hasta y desde la cama

El GL5 eleva al paciente o usuario hasta y desde la cama. La capacidad de alta elevación y el tramo largo implican que se puede colocar correctamente al usuario en el medio de la cama o en una silla de ruedas.

«Este elevador móvil facilita las situaciones diarias de elevación y desplazamiento, tanto para los usuarios como para el personal de asistencia. Pueden ser de gran ayuda en la prevención de lesiones de espalda en los trabajadores»

Responsable, instalaciones de cuidados a largo plazo



...hasta las exigencias específicas




Elevación de grandes pesos

Con una capacidad de elevación de 205 kg, el GL5 es ideal para la elevación de pacientes bariátricos. Dispone de un amplio espacio para el usuario, una gran capacidad de elevación y una estabilidad excepcional que evita que el usuario se sienta incómodo o ansioso.

Elevación horizontal

De nuevo, el diseño de la altura y el alcance de elevación del GL5 lo convierten en adecuado para la elevación horizontal con los accesorios de elevación de tipo camilla de Guldmann.

El elevador móvil GL5 es un elevador completo que, en combinación con las eslingas de Guldmann, cumple la mayoría de requisitos de desplazamiento y manipulación

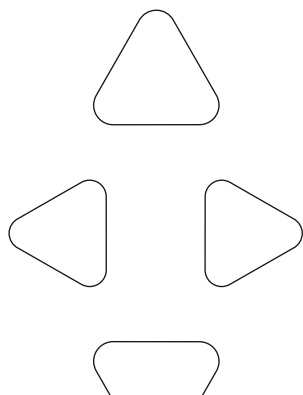



Elevador activo GLS5



Un elevador con muchas funciones

- Elevación desde la posición sentada a erguida (bipedestación)
- Rehabilitación en bipedestación (retirando la bandeja para los pies)
- Desplazamiento desde una silla a otra silla
- Desplazamiento desde la cama a una silla
- Desplazamiento desde la cama / una silla al inodoro

El elevador activo GLS5, igual que el GL5, es un dispositivo de elevación móvil diseñado para facilitar las tareas diarias tanto para los usuarios como para los cuidadores. El GLS5 levanta al usuario desde la posición sentada a erguida. Además, es útil en las frecuentes transferencias diarias entre la cama, la silla y el baño.

Flexibilidad para ayudar a una mayor variedad de usuarios

Para poder utilizar el GLS5, el usuario debe tener, como mínimo, control parcial del torso y poder cooperar. Al estar en el GLS5, los pies del usuario se colocan en la bandeja para los pies, mientras que un soporte para las rodillas acolchado y ajustable sujeta las piernas. Puede utilizarse igualmente la correa para las piernas con aquellos pacientes que precisen una sujeción adicional. El GLS5 está equipado con múltiples puntos de acoplamiento de eslinga, lo que permite utilizar la gama de eslingas activas para crear posiciones de elevación opcionales para una gran variedad de pacientes. Para facilitar que el usuario ande, la bandeja para los pies puede retirarse si el usuario cuenta con un buen equilibrio en bipedestación.

Una forma fácil, cómoda y segura de levantar y sujetar a usuarios con un control parcial o total del torso



Características del GLS5



Cambio sencillo de la batería

Fácil de mantener


- Batería fácil de cambiar para una posible carga externa
- Bandeja para los pies fácil de retirar y limpiar
- Indicador visual de mantenimiento
- Preparado para futuras actualizaciones de software
- Acceso a las estadísticas a través de SIC (consola de información del mantenimiento):
 - Número de elevaciones, vida útil
 - Número de elevaciones desde la última inspección
 - Número de avisos de la batería
 - Número de errores


Funcionamiento sencillo y uso seguro

El uso del GLS5 es sencillo para el cuidador. La elevación y el descenso se controlan eléctricamente, así como el ajuste de la anchura de las patas. Las palancas de empuje son ergonómicas y se han diseñado para adaptarse a la mayoría de alturas y tamaños.

El elevador dispone de una asa de empuje trasera en el pie para mejorar la maniobrabilidad. El GLS5 puede manejarse mediante el control manual o el panel de control. La seguridad ha sido la principal preocupación del diseño del GLS5 de Guldman. Cuenta con un botón de parada de emergencia para situaciones inesperadas de acceso fácil y que se puede liberar manualmente. Dispone de descenso de emergencia (opcional) electrónico o manual, avisos de la batería (visuales y acústicos), indicador de sustitución del accionador y la capacidad de obtener información del uso del elevador a través de la interfaz SIC.

Finalmente, la guía de usuario, con un resumen de funcionamiento, se encuentra en un lateral de la caja de control.

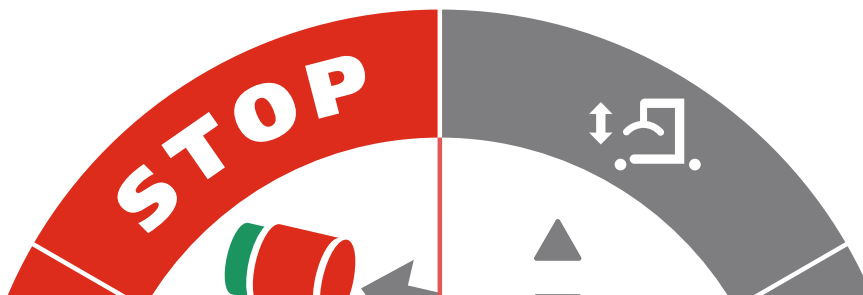

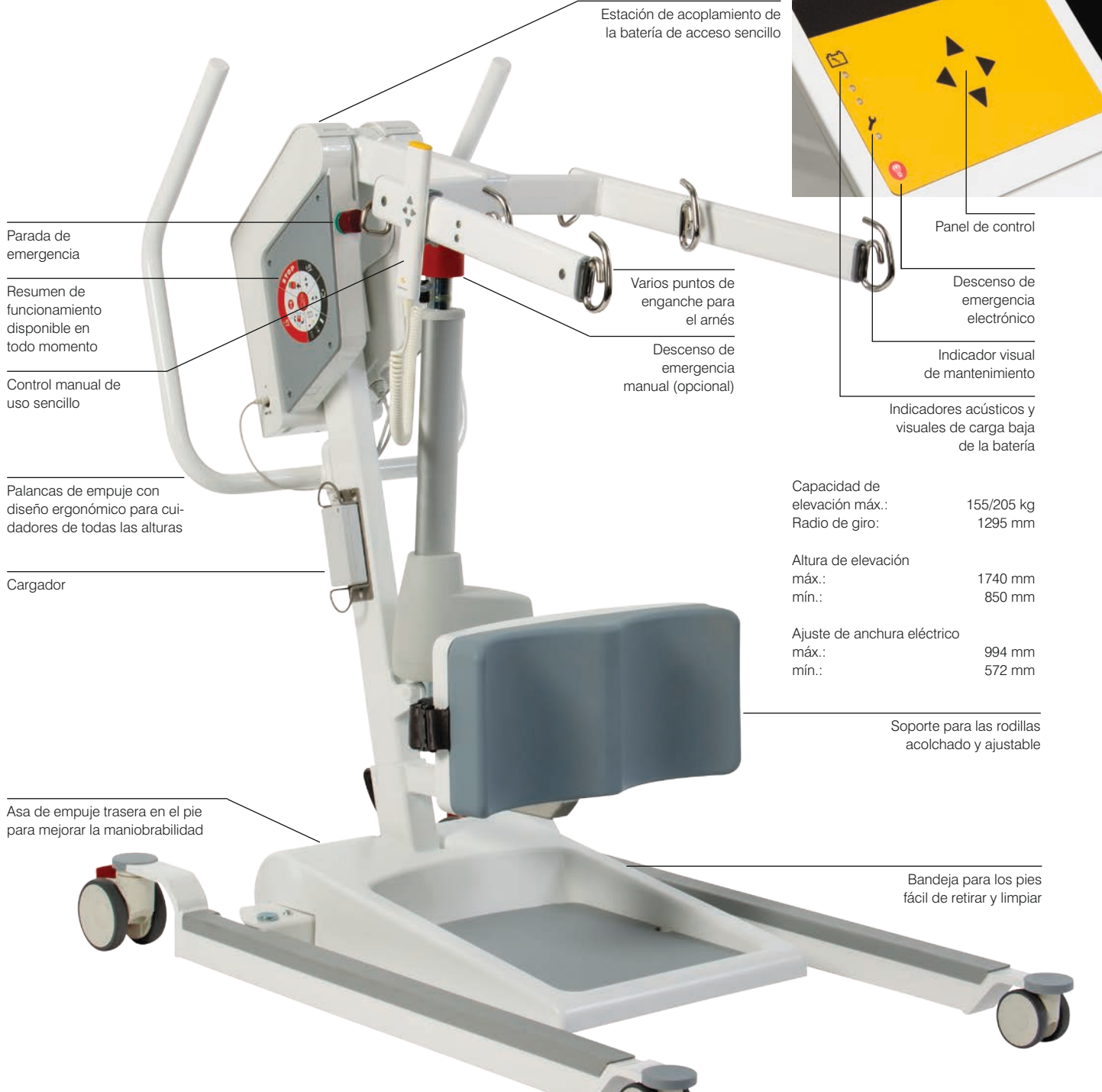

Parada de emergencia

Resumen de funcionamiento disponible en todo momento

Control manual de uso sencillo

Palancas de empuje con diseño ergonómico para cuidadores de todas las alturas

Cargador

Asa de empuje trasera en el pie para mejorar la maniobrabilidad

Estación de acoplamiento de la batería de acceso sencillo

Varios puntos de enganche para el arnés

Descenso de emergencia manual (opcional)

Panel de control

Descenso de emergencia electrónico

Indicador visual de mantenimiento

Indicadores acústicos y visuales de carga baja de la batería


Capacidad de elevación máx.: 155/205 kg
Radio de giro: 1295 mm

Altura de elevación máx.: 1740 mm
mín.: 850 mm

Ajuste de anchura eléctrico máx.: 994 mm
mín.: 572 mm

Soporte para las rodillas acolchado y ajustable

Bandeja para los pies fácil de retirar y limpiar

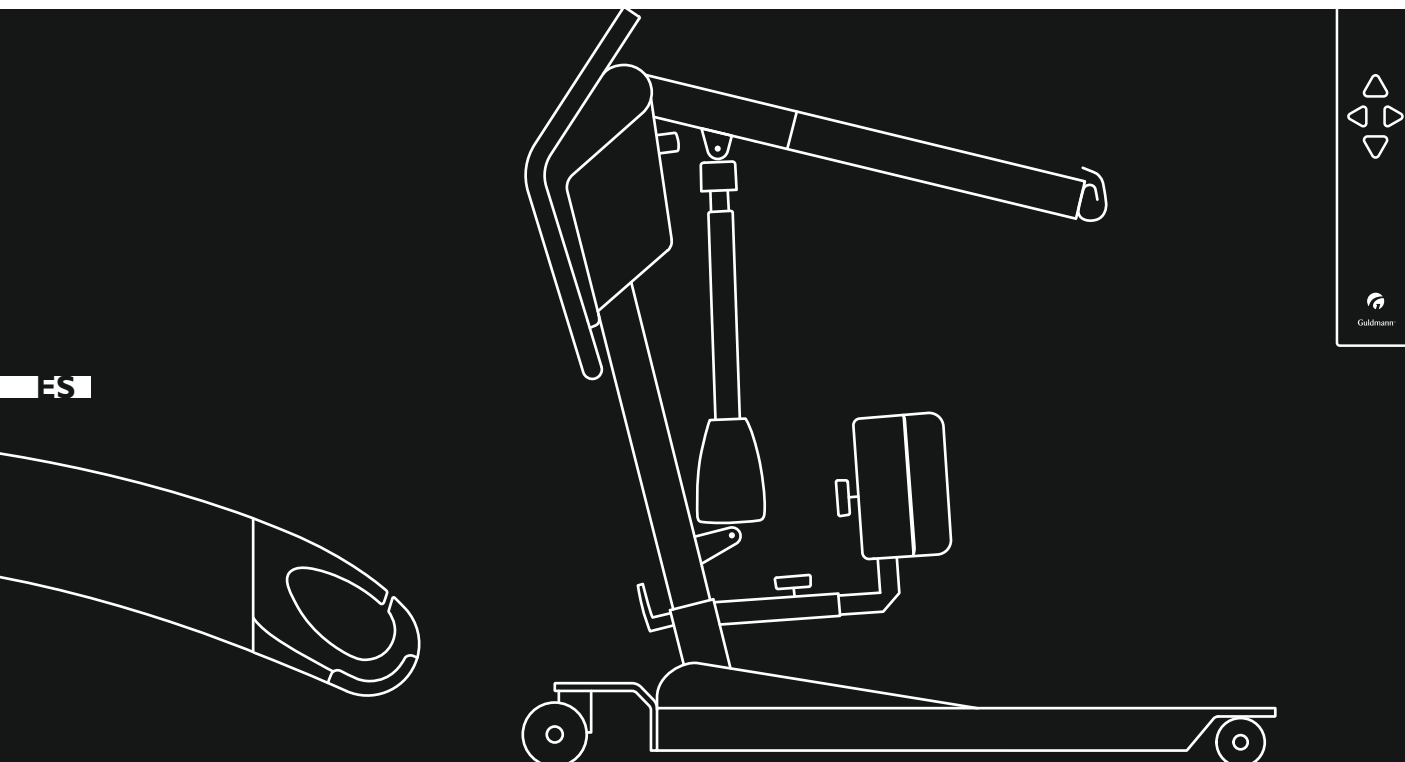

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Head Office:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

Guldmann Srl
Via al Piemonte 49
I-17031 Leca d'Albenga
Tel. +39 (0) 182 586146
Fax +39 (0) 182 590384
N° Verde 800 781 604
Cell. +39 348 060 2353
italia@guldmann.com
www.guldmann.it

**Guldmann do Brasil
Importação e
Comercio Ltda.**
Rua Oscar Freire, 379
3º andar – conjunto 32
São Paulo – SP Brasil
CEP 01426 001
Tel. +55 11 2127 0795

Guldmann™